

INSTRUKCJA OBSŁUGI CIŚNIENIOWEGO STERYLIZATORA PAROWEGO AUTOKLAW STANDARD LINE

1. Podłączyć przewód zasilający do gniazda z tyłu urządzenia, a następnie do gniazda elektrycznego.
2. Jeśli na wyświetlaczu zapali się kontrolka „Water”, będzie słyszalny dźwięk, oznacza to, że poziom wody w zbiorniku na wodę czystą (destylowaną) jest zbyt niski i trzeba uzupełnić zbiornik.
3. Jeśli woda zostanie uzupełniona do poziomu wystarczającego do przeprowadzenia jednego cyklu zgaśnie lampka kontrolna i nie będzie słyszalny dźwięk.
4. Do autoklawu należy wlewać wyłącznie wodę destylowaną o odpowiedniej jakości.
5. Przed napełnieniem wody, należy włączyć autoklaw i wyregulować stopkami jego położenie tak, aby przód urządzenia był podniesiony minimum 1 cm w stosunku do tylnej części urządzenia.
6. Przy każdym napełnieniu zbiornika na wodę czystą, należy również opróżnić zbiornik na zużytą wodę.
7. Jeśli nie migają kontrolki „Water” i „Drain” oznacza to, że urządzenie jest w stanie gotowości do pracy.
8. Wsad sterylizacyjny umieścić w komorze sterylizacyjnej.
9. Umieszczany wsad nie może stanowić więcej niż 70% objętości komory.
10. Zabroniony jest kontakt przedmiotów przeznaczonych do sterylizacji ze ścianami komory.
11. W celu oceny skuteczności sterylizacji stosowany wskaźnik umieścić wewnątrz pakietu.
12. Do umieszczania i wyjmowania wsadu używać rączki/uchwyty, aby uniknąć ryzyka poparzenia się.
13. Po wybraniu odpowiedniego programu nacisnąć przycisk start, aby uruchomić program. Urządzenie automatycznie zrealizuje wszystkie etapy, tj. fazę nagrzewania wstępnego, 3-krotnego wytwarzania próżni, sterylizacji i suszenia.
14. Należy niezwłocznie uzupełnić zbiornik na czystą wodę, jeśli na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie wody.
15. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć autoklaw.
16. Narzędzia są gotowe do użytkowania.
17. Po otwarciu pakietu należy od razu zużyć wszystkie narzędzia.
18. Pakiet zamknięty może być przechowywany do następnego użytkowania.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill