

PROCEDURA

DEZYNFEKCJI I POSTĘPOWANIA Z AKCESORIAMI FRYZJERSKIMI

CELE:

1. Zapobieganie szerzeniu się chorób bakteryjnych i grzybiczych.
2. Ochrona przed zakażeniami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiada opiekun, pokojowa, osoba zajmująca się stryżeniem i czesaniem Mieszkańców.

ZASTOSOWANIE

1. Preparaty do dezynfekcji należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach oryginalnych, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych i w warunkach przechowywania określonych w karcie charakterystyki produktu.
2. Roztwory dezynfekcyjne są sporządzane przed każdorazowym użyciem.
3. Nie wolno łączyć różnych preparatów dezynfekcyjnych ani dodawać preparatów myjących.
4. Grzebienie, nożyczki do włosów, maszynki do włosów po każdorazowym użyciu należy umyć wodą z mydłem, osuszyć i zdezynfekować płynem do dezynfekcji – CLIPPERCIDE (zgodnie z Instrukcją stanowiącą załącznik nr 7 do Procedury dezynfekcji i postępowania z akcesoriami fryzjerskimi).
5. Po zakończeniu pracy grzebienie i nożyczki do włosów należy zdezynfekować w 0,5% roztworu roboczego ANIOSYME DD1 lub ENZYME X L9 (zgodnie z Instrukcją stanowiącą załącznik nr 5 i 6 do Zarządzenia nr 9/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 09 maja 2023 r.) w wannie dezynfekcyjnej.
6. Każdy Mieszkaniec jest pielęgnowany czystym, zdezynfekowanym narzędziem.
7. Brudne narzędzie po użyciu należy włożyć do pojemnika oznaczonego „BRUDNE”.
8. Narzędzia zdezynfekowane należy osuszyć i umieścić w pojemniku oznaczonym „CZyste”.
9. Zdezynfekowane narzędzia są gotowe do kolejnego użycia.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill

PROCEDURA

DEZYNFEKCJI I POSTĘPOWANIA Z AKCESORIAMI KOSMETYCZNYMI DO PIELĘGNACJI PAZNOKCI

CELE:

1. Zapobieganie szerzeniu się chorób bakteryjnych i grzybiczych.
2. Ochrona przed zakażeniami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za prawidłowe stosowanie procedury odpowiada opiekun, pokojowa, osoba zajmująca się pielęgnacją paznokci Mieszkańców.

ZASTOSOWANIE

1. Preparaty do dezynfekcji należy przechowywać w zamkniętych opakowaniach oryginalnych, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych i w warunkach przechowywania określonych w karcie charakterystyki produktu.
2. Roztwory dezynfekcyjne są sporządzane przed każdorazowym użyciem.
3. Nie wolno łączyć różnych preparatów dezynfekcyjnych ani dodawać preparatów myjących.
4. Czyste obcinaczki i nożyczki do paznokci są przechowywane w pojemniku opisanym „CZYSTE”.
5. Każdy Mieszkaniec jest pielęgnowany czystym, zdezynfekowanym narzędziem.
6. Brudne narzędzia po użyciu należy włożyć do pojemnika oznaczonego „BRUDNE”.
7. Po zakończeniu pracy przyrządy do obcinania paznokci należy zdezynfekować w 0,5% roztworze roboczym ANIOSYME DD1 lub ENZYMEX L9 (zgodnie z Instrukcją stanowiącą załącznik nr 1 i 2 do Procedury dezynfekcji i postępowania z akcesoriami kosmetycznymi do pielęgnacji paznokci) w waniencie dezynfekcyjnej opisaną nazwą środka dezynfekującego i stężeniem roztworu, umyć wodą z mydłem, osuszyć.
8. Narzędzia zdezynfekowane należy umieścić w pojemniku oznaczonym „CZYSTE”
9. Datę dezynfekcji oraz imię i nazwisko osoby dezynfekującej wpisuje się do REJESTRU DEZYNFEKCJI (stanowiącego załącznik nr 4 Zarządzenia Nr 9/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 09 maja 2023r.) znajdującego się w pomieszczeniu przeznaczonym do dezynfekowania (pokój nr 25).
10. Zdezynfekowane narzędzia są następnie wysterylizowane w autoklawie, znajdującym się w pokoju nr 25.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill

11. Narzędzia sterylizuje się zgodnie z instrukcją obsługi umieszczoną w widocznym miejscu (stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 9/2023 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubuczewie z dnia 09 maja 2023 r.).
12. Wysterylizowane narzędzia są gotowe do ponownego użycia.
13. Pakiety z wysterylizowanymi narzędziami opisane są datą sterylizacji i mają ważność 1 miesiąca od tej daty.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill

INSTRUKCJA OBSŁUGI
CIŚNIENIOWEGO STERYLIZATORA PAROWEGO AUTOKLAW
STANDARD LINE

1. Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy wykonać test biologiczny Sporal A i sprawdzić skuteczność sterylizacji w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Słupsku.
2. Test Sporal A należy powtarzać raz do roku.
3. Podłączyć przewód zasilający do gniazda z tyłu urządzenia, a następnie do gniazda elektrycznego.
4. Jeśli na wyświetlaczu zapali się kontrolka „Water”, będzie słyszalny dźwięk, oznacza to, że poziom wody w zbiorniku na wodę czystą (destylowaną) jest zbyt niski i trzeba uzupełnić zbiornik.
5. Jeśli woda zostanie uzupełniona do poziomu wystarczającego do przeprowadzenia jednego cyklu zgaśnie lampka kontrolna i nie będzie słyszalny dźwięk.
6. Do autoklawu należy wlewać wyłącznie wodę destylowaną o odpowiedniej jakości.
7. Przed napełnieniem wody, należy włączyć autoklaw i wyregulować stopkami jego położenie tak, aby przód urządzenia był podniesiony minimum 1 cm w stosunku do tylnej części urządzenia.
8. Przy każdym napełnieniu zbiornika na wodę czystą, należy również opróżnić zbiornik na zużytą wodę.
9. Jeśli nie migają kontrolki „Water” i „Drain” oznacza to, że urządzenie jest w stanie gotowości do pracy.
10. Wsad sterylizacyjny umieścić w komorze sterylizacyjnej.
11. Umieszczony wsad nie może stanowić więcej niż 70% objętości komory.
12. Zabroniony jest kontakt przedmiotów przeznaczonych do sterylizacji ze ścianami komory.
13. W celu oceny skuteczności sterylizacji stosowany wskaźnik umieścić wewnątrz pakietu.
14. Do umieszczania i wyjmowania wsadu używać rączki/uchwyty, aby uniknąć ryzyka poparzenia się.
15. Po wybraniu odpowiedniego programu nacisnąć przycisk start, aby uruchomić program. Urządzenie automatycznie zrealizuje wszystkie etapy, tj. fazę nagrzewania wstępnego, 3-krotnego wytwarzania próżni, sterylizacji i suszenia.
16. Należy niezwłocznie uzupełnić zbiornik na czystą wodę, jeśli na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie o niskim poziomie wody.
17. Po zakończeniu pracy należy wyłączyć autoklaw.
18. Narzędzia są gotowe do użytkowania.
19. Po otwarciu pakietu należy od razu użyć wszystkie narzędzia.
20. Pakiet zamknięty może być przechowywany do następnego użytkowania.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill

Załącznik nr 5
do Zarządzenia Nr 9/2023
Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Lubuczewie
z dnia 09 maja 2023 r.

ANIOSYME DD1®
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI MEDYCZNYCH
PRZED STERYLIZACJĄ

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

1. Preparat enzymatyczny o właściwościach myjąco-dezynfekcyjnych.
2. Kompleks trzech enzymów: proteaza, lipaza, amylaza w połączeniu ze środkami powierzchniowo czynnymi.
3. Udowodniona skuteczność (DCP*) *ang. Degreasing Cleaning Power - Odtłuszczająca Moc Czyszcząca.
4. Preparat bezchlorowy: nie powoduje utleniania materiałów.
5. Formuła bez aldehydów: nie denaturuje białek • Neutralne pH: kompatybilne ze stopami metali.
6. Formuła bez chlorku (propionian amonu): nie powoduje korozji materiałów.
7. Może być stosowany w myjkach ultradźwiękowych.
8. Jasnoniebieski kolor.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Przygotowanie roztworu w stężeniu 0,5%: dozować 25 ml koncentratu na 5 l wody (zimnej lub letniej).
2. Roztwór roboczy należy wymieniać na nowy przynajmniej raz dziennie lub każdorazowo, gdy jest widocznie zanieczyszczony.
3. Należy całkowicie zanurzyć wyroby medyczne w roztworze produktu.
4. Czas zanurzenia: 15 min.
5. Jeśli to konieczne, narzędzia należy doczyścić szczotką.
6. Wyroby medyczne obficie spłukać wodą wodociągową, aby usunąć wszelkie pozostałości produktu i zabrudzenia organiczne.
7. Osuszyć narzędzia czystym papierowym ręcznikiem.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

Mycie i dezynfekcja narzędzi medycznych.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyrób medyczny klasy IIb (zgodnie z Dyrektywą 93/42/ EEC).

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill

Załącznik nr 6
do Zarządzenia Nr 9/2023
Dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Lubuczewie
z dnia 09 maja 2023 r.

ENZYMEK L9 INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI I MYCIA NARZĘDZI

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

1. Płynny preparat o doskonałych właściwościach dezynfekcyjnych i myjących - skuteczny wobec biofilmu.
2. Szerokie spektrum biobójcze w czasie 10 minut: B, Tbc, Y, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona).
3. Stężenie roztworu roboczego od 0,5% przebadany w warunkach brudnych wg. fazy 2/1 i fazy 2/2 norm europejskich.
4. Kompleks trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) w połączeniu z detergentami rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne (krew, ropę, białko, itp.) i zapobiega ich utrwalaniu (zaschnięciu, koagulacji).
5. Neutralne pH roztworu – wysoka kompatybilność materiałowa.
6. Potwierdzona licznymi testami analiza elektrochemicznej korozji wżerowej zgodnie z norma NF S94-402-1.
7. Narzędzia mogą być bezpiecznie przechowywane w roztworze nawet do 72 godzin.
8. Preparat zachowuje aktywność niezależnie od jakości wody.
9. Możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych i myjniach półautomatycznych.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA

1. Produkt do użytku profesjonalnego. Koncentrat – stosować w roztworach roboczych.
2. Napełnić wanienkę dezynfekcyjną lub myjkę ultradźwiękową wodą.
3. Na każdy litr wody wlać odpowiednią ilość koncentratu w zależności od oczekiwanego spektrum biobójczego (**5 ml koncentratu na litr wody**). Zamieszać roztwór.
4. Dokładnie zanurzyć narzędzia.
5. Wanienkę dezynfekcyjną przykryć. Odczekać zalecany czas kontaktu: 10 minut. Doczyścić, jeśli to konieczne.
6. Wyjąć i wypłukać dokładnie wyroby medyczne pod bieżącą wodą.
7. Osuszyć narzędzia czystym papierowym ręcznikiem.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill

CLIPPERCIDE **INSTRUKCJA DEZYNFEKCJI I MYCIA NARZĘDZI**

Aerozol do profesjonalnej dezynfekcji w salonach fryzjerskich, barberskich i groomerskich. Niszczy patogeny chorobotwórcze z ostrzy maszynek do włosów oraz trymerów, brzytw, nożyczek i grzebieni.

SPEKTRUM DZIAŁANIA

Skutecznie niszczy bakterie (*Staphylococcus a.*, *Pseudomonas a.*, *Enterococcus*), grzyby drożdżopodobne (*Candida albicans*) oraz wirusy otoczkowe takie, jak koronawirusy np. SARS (Covid-19), flawiwirusy np. wirus zapalenia wątroby typu B i C (HBV i HCV), BVDV poksowirusy np. Vaccinia virus (VACV), retrowirusy np. HIV (AIDS), herpeswirusy np. wirus opryszczki ludzki typu 1 i 2 (HHV-1 i HHV-2).

WŁAŚCIWOŚCI

1. CLIPPERCIDE nie zawiera aldehydów, nie ma duszącego zapachu i nie wywołuje reakcji alergicznych i podrażnień.
2. Posiada w składzie substancję zapobiegającą powstawaniu rdzy i przedłużającą okres użytkowania nasadki. CLIPPERCIDE skutecznie regeneruje także stare maszynki oraz usuwa rdzę.
3. Ciśnienie strumienia preparatu usuwa włosy, kurz i zabrudzenia pomiędzy nożykami – czyszcząc jednocześnie powierzchnię. CLIPPERCIDE posiada również funkcję chłodzenia, umożliwiającą dłuższą eksploatację maszynki do strzyżenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Spryskać ostrza maszynki, trymera lub nożyczki, tak aby zostały pokryte produktem. **WAŻNE!** Nie spryskiwać powierzchni maszynki i dbać, aby płyn nie przedostał się do części elektronicznych maszynki lub trymera. Efekt wirusobójczy, bakteriobójczy i drożdżakobójczy następuje w czasie 5 minut, a grzybobójczy w czasie 10 minut.

Spełnia normy: EN 14476 (aktywność wobec wirusów), EN 14561 (aktywność wobec bakterii) i EN 14562 (aktywność wobec grzybów i bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych).

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Lubuczewie
mgr Monika Bill